

## Bedienungsanleitung Rollstuhlrampenpodest TRP-Plattform-MK2

### Vor der ersten Nutzung:

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht im Versand beschädigt wurde
- Lesen Sie die Benutzungshinweise und Warnungen vor der ersten Nutzung dieses Produktes
- Behalten Sie diese Hinweise
- Auf jedem Produkt sehen Sie einen Sticker mit der max. erlaubten Belastung

### Inhalt:

- Podest Rahmen (Bild 1), Podest Platte x1 (Bild 2), Sicherheitskanten 4x & Montagematerial (Bild 3), Bein mit Erweiterungsset 4x (Bild 4).

**Bild 1**



**Bild 2**



**Bild 3**



**Bild 4**



## Der Zusammenbau:

1. Öffnen Sie den Rahmen des Podestes (Bild 5). Stellen Sie die Beine auf die gewünschte Höhe ein (wenn nötig nutzen Sie dazu auch das Erweiterungsset) (Bild 6,6a). Schrauben Sie die Beine in den Rahmen (Bild 7).
2. Sobald die Beine eingeschraubt sind und auf die korrekte Höhe eingestellt, ziehen Sie die Muttern an, mit einem Schraubenschlüssel (Schraubenschlüssel im Lieferumfang nicht enthalten), um die Beine zu fixieren. (Bild 8).
3. Stellen Sie den Rahmen an die gewünschte Stelle (Bild 9) und nutzen Sie die Sicherheitsstifte, um den Rahmen zu sichern. (Bild 10).
4. Nun öffnen Sie die Podest-Platte und positionieren Sie diese auf dem Rahmen (Bild 11).
5. Fixieren Sie jetzt die Sicherheitskanten in die vorgebohrten Löcher mit dem dazugehörigen Montagematerial (Bild 12).
6. Zum Abschluss stellen Sie sicher, dass das Podest sicher und geradesteht. Dann können Sie die Rollstuhlrampen darauf positionieren (Bild 13).

Bild 5



Bild 6



Bild 6a



Bild 7




Bild 8



**Bild 9**




**Bild 10**

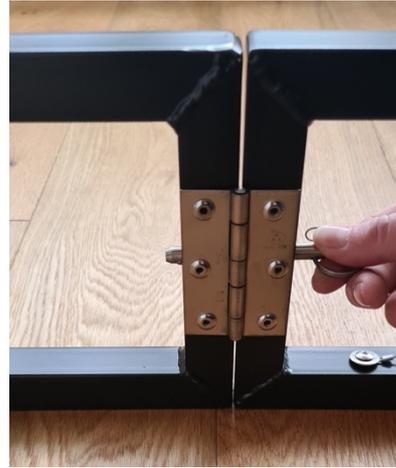

**Bild 11**



**Bild 12**

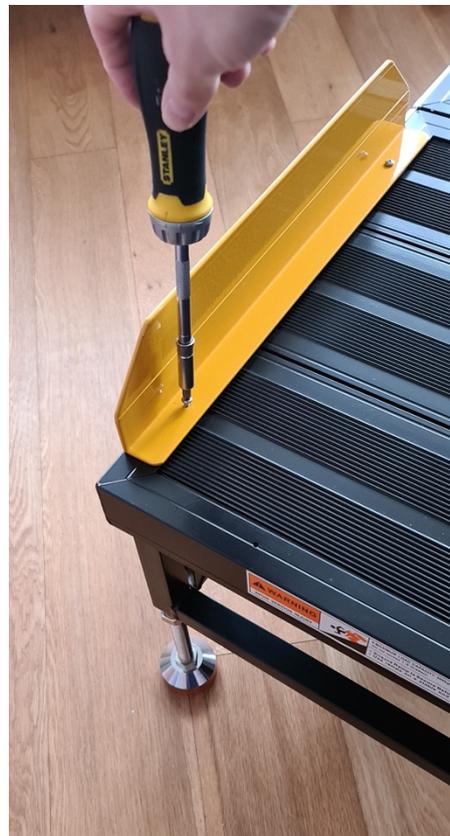

**Bild 13**



## **Wartung**

- Sollte das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt sein, sehen Sie unbedingt von der weiteren Nutzung ab. Kontaktieren Sie uns umgehend.
- Dieses Produkt kann mit handelsüblichen Produkten gereinigt werden. Bitte lassen Sie es vollständig trocknen vor der nächsten Nutzung.

## **Gewährleistung und Garantien**

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

## **Haftung**

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
- bei Garantieverprechen, soweit vereinbart, oder
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
- 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

**Die TRP-Plattform-MK2 ist Teil unseres Produktkataloges. Um den ganzen Produktkatalog zu sehen, besuchen Sie bitte unsere Webseite:**

[www.derrampenshop.de](http://www.derrampenshop.de)

**Oder kontaktieren Sie uns via Post, E-Mail oder rufen Sie uns an!**

## **Der Rampen Shop.de Onlineshop GmbH**

Lungstraße 8  
51399 Burscheid

Tel: +(49) 211 2409022

E-Mail: [info@derrampenshop.de](mailto:info@derrampenshop.de)

[www.derrampenshop.de](http://www.derrampenshop.de)

