

Benutzungshinweise für Verbindungsträger TRP-WR-JS

Vor der ersten Nutzung:

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht im Versand beschädigt wurde
- Lesen Sie die Benutzungshinweise und Warnungen vor der ersten Nutzung dieses Produktes
- Behalten Sie diese Hinweise
- Auf jedem Produkt sehen Sie einen Sticker mit der max. erlaubten Belastung

Inhalt:

- Montagematerial: 12x je Muttern, Schrauben, Trennscheiben und Federscheiben (Bild 1), Verbindungsträger Platte (Bild 2), Verbindungsträger Beine (Bild 3), Halterung für weitere Sicherung des Verbindungsträgers (Bild 4)

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Der Zusammenbau:

1. Verbinden Sie die Verbindungsträgerbeine mit der Platte in der gewünschten Höhe und nutzen Sie dafür das Montagematerial. Fixieren Sie die Schrauben noch nicht ganz, stellen Sie erst sicher, dass Rampe in Position liegt, bevor sie die Schrauben ganz fest drehen (Bild 5,6)
2. Sobald alles in der korrekten Position liegt, ziehen Sie die Schrauben fest mit einem Schraubenschlüssel (Schraubenschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten) (Bild 7)
3. Der Verbindungsträger ist nun fertig zusammengebaut (Bild 8,9). Wenn notwendig, kann der Verbindungsträger auch auf dem Boden befestigt werden. (Montagematerial für den Boden ist nicht im Lieferumfang enthalten). Positionieren Sie den Verbindungsträger und die Rampen können nun auf dem Verbindungsträger aufgelegt werden.

Beachten Sie bitte, dass die untere Rampe MUSS auf der schmalen Seite aufgelegt werden und die obere Rampe auf der tieferen Seite. (Bild 10)

Bild 5



Bild 6



Bild 7




Bild 8



Bild 9



Bild 10

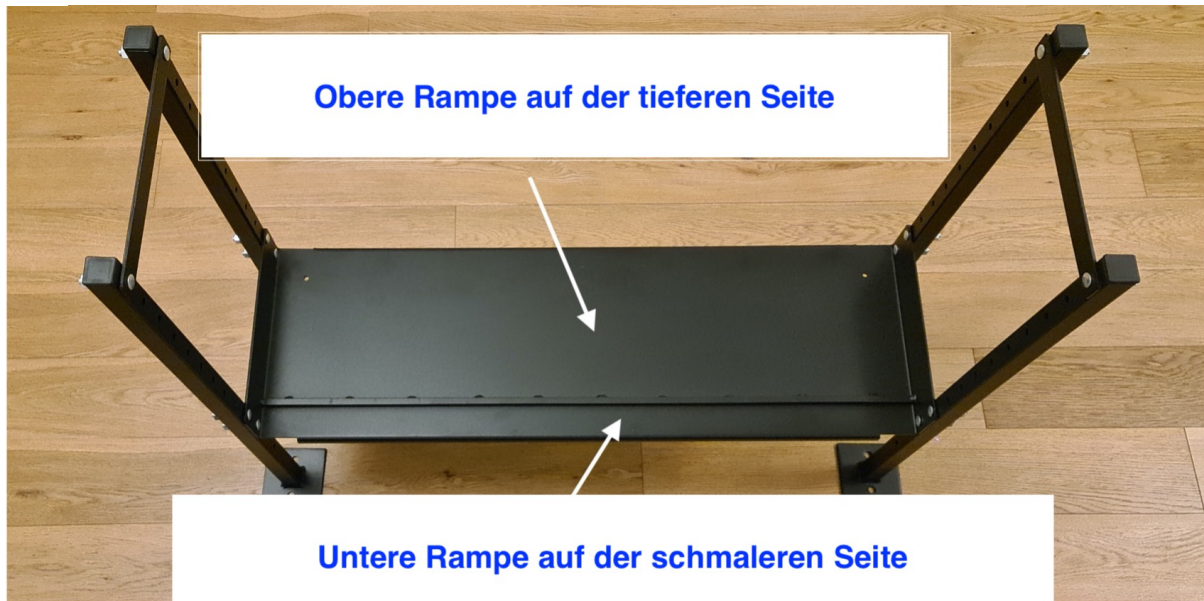

Wartung

- Sollte das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt sein, sehen Sie unbedingt von der weiteren Nutzung ab. Kontaktieren Sie uns umgehend.
- Dieses Produkt kann mit handelsüblichen Produkten gereinigt werden. Bitte lassen Sie es vollständig trocknen vor der nächsten Nutzung.

Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

Haftung

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
- bei Garantieverprechen, soweit vereinbart, oder
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
-

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

Die TRP-WR-JS ist Teil unseres Produktkataloges. Um den ganzen Produktkatalog zu sehen, besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.derrampenshop.de

Oder kontaktieren Sie uns via Post, E-Mail oder rufen Sie uns an!

Der Rampen Shop.de Onlineshop GmbH

Lungstraße 8
51399 Burscheid

Tel: +(49) 211 2409022
E-Mail: info@derrampenshop.de

www.derrampenshop.de

